

## Lot de 25 éthylotests chimiques

Référence : ETHCB

### Description :

Lot de 25 éthylotests chimiques ballons, à usage unique permettant de tester rapidement le taux d'alcoolémie d'un utilisateur.

Cet éthylotest est facile à utiliser grâce à son embout buccal avec valve pour souffler et son tube réactif pour lire le résultat.

Si le test est positif, le coloris sera alors rouge. Si le test est négatif, il n'y aura pas de coloris.

Ethylotest à usage unique, quel que soit le résultat.

**Calibrage au seuil contraventionnel français (0,25 mg/l d'air expiré équivalent à 0,5 g/l de sang).**

### Caractéristiques techniques :

Dimension : L 140 x l 160 x H 10 mm

Température d'utilisation : 10°C à +40°C

Température de stockage : -20°C à +70°C

Durée de péremption : 24 mois

Poids / éthylotest : 14 grammes

Livré dans une boîte présentoir en carton.

Chaque éthylotest jetable est emballé individuellement.



**Certification : NF : NFX 20-702 : 2014 sans Chrome.**

**Répond aux exigences de la directive EUROPEENE REACH (pour la protection de santé humaine).**

### Mode d'emploi :

**Le mode d'emploi est indiqué sur chaque éthylotest :**

- 1- Sortir le tube réactif ;
- 2- Le percuter en pressant les 2 côtés ;
- 3- Souffler dans le ballon de manière continue et sans interruption ;
- 4- Insérer le tube sur le ballon ;
- 5- Dégonfler le ballon entièrement ;
- 6- Retirer le tube ;
- 7- Garder en main le tube, selon la durée indiquée par la couleur de la pastille sur le ballon (blanc : 1 minute ; rouge : 3 minutes).