

## Solution neutre rince-œil Flacon de 200 ml

Référence : FPHNS

### Description :

Solution rince-œil qui permet d'apporter un premier soin immédiat en cas de projection de produits chimiques, d'acides ou de bases (sauf acide fluorhydrique) dans l'œil. Grâce à son format ergonomique, il s'intègre facilement aux environnements de travail avec des risques de projections de produits chimiques dans les yeux.

Flacon de 200 ml, contenant une solution au pH neutre, de pH = 7,4.  
Ce volume correspond à 2 minutes de lavage.

Ce flacon est facile à utiliser grâce à son ouverture rapide et son œillère qui permet de maintenir l'œil ouvert lors de son utilisation.  
Pour ouvrir le flacon, il faut tourner l'opercule à 360° garantissant la stérilité de la solution.

Effet précis : neutralisation d'acides et d'alcalins.

Identifications des dangers : aucun risque spécifique lors de l'utilisation correcte de ce produit.



### Conseil d'utilisation :

Le rinçage oculaire est à effectuer dans la minute qui suit l'accident oculaire.

Presser doucement le flacon pour assurer un jet doux et régulier, ne pas presser fortement le flacon.

Nous préconisons un lavage avec la tête en arrière puis de rincer l'œil avec un flacon rince-œil de 200 ml de solution Saline (référence EPFOS, non fournie).

Consulter un médecin et continuer le rinçage pendant le transport ambulancier.

Ne pas réutiliser : risque d'infection.

*Le produit est un Dispositif Médical et soumis à la Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux.*